



## Guía para la Adhesión



Estas son algunas recomendaciones que puede seguir para ayudar a mantener el sensor en su lugar.



### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PIEL PARA UNA ADHESIÓN ÓPTIMA

#### 1. LAVADO

Solo utilice **jabón no humectante y sin fragancia** para lavar la zona donde aplicará el sensor.

#### 2. LIMPIEZA

Utilice la toallita con alcohol proporcionada en el kit del sensor para **eliminar cualquier residuo oleoso**.

#### 3. SECADO

**Deje que su piel se seque por completo** antes de aplicar el sensor. Esto es especialmente importante si planea aplicar el sensor después de ducharse o de nadar.

### PRODUCTOS QUE BRINDAN ADHERENCIA ADICIONAL\*:

#### VENDAJE SUPERFICIAL

Un adhesivo de grado médico; vendaje o cinta†.



#### SKIN TAC DE TORBOT

Una barrera para la piel de tipo adhesivo hipoalergénica y sin látex.

[Torbot.com](http://Torbot.com)

#### TEGADERM I.V.

Una película transparente que proporciona resistencia adhesiva.

[3m.com](http://3m.com)

#### TOALLITAS CON BARRERA PROTECTORA SKIN-PREP

Apósito protector líquido que ofrece permeabilidad a la piel, de manera que las cintas y las películas se adhieren con mayor firmeza.

[Smith-nephew.com](http://Smith-nephew.com)

#### ADHESIVO LÍQUIDO MASTISOL

Adhesivo líquido transparente, no irritante, no soluble en agua que sujeta los apósitos incluso en áreas húmedas.

[Eloquesthealthcare.com](http://Eloquesthealthcare.com)

\* La siguiente información no constituye una aprobación del fabricante ni de la calidad del producto. Abbott Diabetes Care no asume la responsabilidad de la integridad o la precisión de la información del producto. La disponibilidad del producto puede variar según el país y la región. Se deben seguir las instrucciones de uso del fabricante de cada producto.

† El vendaje superficial debe colocarse en el momento de la aplicación del sensor. La abertura u orificio en el centro del sensor no debe estar cubierto. Se pueden aplicar vendas o cintas de grado médico adicionales, pero no retire vendas o cintas una vez aplicadas hasta que ya se pueda retirar el sensor.

Consulte el reverso del documento para obtener Indicaciones e Información Importante de Seguridad.

## RECORDATORIOS SOBRE ELEMENTOS QUE NO DEBEN ENCONTRARSE ENTRE EL SENSOR Y SU PIEL:



- Humedad de cualquier tipo.
- Vellos. Considere afeitarse el área de aplicación.
- Residuos oleosos de jabón, emulsión, shampoo o acondicionador.

## RECOMENDACIONES PARA MANTENER EL SENSOR EN SU LUGAR:



### SEA CUIDADOSO

Tenga cuidado de que el sensor no quede atrapado en objetos como puertas, puertas de automóviles, cinturones de seguridad y bordes de muebles.



### NO SE APRESURE

Al vestirse o sacarse la ropa, tenga cuidado de que el sensor no quede atrapado en las prendas.



### SEQUE DANDO TOQUES

Después de ducharse o de nadar, tenga especial cuidado cuando se esté secando con una toalla para evitar atrapar o arrancar el sensor.



### JUEGUE DE MANERA SEGURA

Si practica deportes de contacto y realiza ejercicio intenso, fije el sensor en la parte posterior y superior de su brazo para minimizar el riesgo de que este se salga. Considere la posibilidad de utilizar un vendaje superficial u otros productos adhesivos mencionados anteriormente.



### VÍSTASE DE FORMA ADECUADA

Otorgue al sensor un espacio amplio usando ropa holgada y materiales livianos.



### MANTENGA SUS MANOS FUERA

Intente no jugar, tirar o tocar el sensor mientras lo usa.



**Estamos aquí para ayudarlo. Para obtener más ayuda con la adhesión del sensor, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Abbott llamando al 1-855-632-8658.**



### Indicaciones e Información Importante de Seguridad

**Sistema FreeStyle Libre de 14 días:** Si no se utiliza el sistema FreeStyle Libre de 14 días según las instrucciones en el etiquetado, se puede evitar la detección un evento grave de niveles de glucosa bajos o altos o no tomar una decisión sobre el tratamiento, lo que puede provocar daños. Si las lecturas no coinciden con los síntomas o con los resultados previstos, utilice el valor indicado por un glucómetro mediante una punción en el dedo para tomar decisiones sobre el tratamiento. Busque atención médica cuando corresponda o comuníquese con Abbott llamando al 855-632-8658 o visite <https://www.FreeStyle.abbott/us-en/safety-information.html> para obtener información de seguridad.

**Sistema FreeStyle Libre 2:** Si no se utiliza el sistema FreeStyle Libre 2 según las instrucciones en el etiquetado, se puede evitar la detección un evento grave de niveles de glucosa bajos o altos o no tomar una decisión sobre el tratamiento, lo que puede provocar daños. Si las alertas y las lecturas de glucosa no coinciden con los síntomas o con los resultados previstos, utilice el valor indicado por un glucómetro mediante una punción en el dedo para tomar decisiones sobre el tratamiento. Busque atención médica cuando corresponda o comuníquese con Abbott al llamando 855-632-8658 o visite <https://www.FreeStyle.abbott/us-en/safety-information.html> para obtener información de seguridad.

La forma circular de la carcasa del sensor, FreeStyle, Libre y las marcas de identificación relacionadas son marcas de Abbott. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.